

# HLW Übungshund

Art. Nr.: VET4660

Cooper



*Experts in medical education  
since 1950*



**ERLER ZIMMER**

Erlor-Zimmer GmbH & Co. KG · Hauptstr. 27 · D-77886 Lauf  
Tel.: (+49) 7841 / 6003-0 · info@erler-zimmer.de · www.erler-zimmer.de



◀ Das Modell bestehet aus 4 Teilen.

Der Körper, Gummiblock, Luftweg und die Pulspumpe

## Einlegen & Entfernen des Luftwegs



1. Entnehmen Sie den Block und führen Sie den Luftwegbeutel durch die Öffnung im Halsbereich zu der Nasenöffnung.

Den Luftweg mit der geöffneten Seite voran einführen.



2. Greifen Sie den Luftweg an der Nasenöffnung und ziehen ihn ca. 10cm aus der Öffnung heraus. Stülpen Sie nun die offene Seite des Luftwegs über die Nase des Hundes.

3. Legen Sie den Beutel flach im Innenteil aus



4. Wichtig! Die Zunge muss bis zur Hälfte herausgezogen werden, da sonst die Beatmung nicht funktioniert.

**5. Entfernen des Luftwegs:**  
Wichtig! Ziehen Sie den Beutel NICHT durch die Nase heraus, sondern durch die Öffnung im Halsbereich.



**6. Pulskontrolle :**  
Verbinden Sie die manuelle  
Pulspumpe mit dem Schlauch  
welcher sich am Hinterlauf  
befindet.





**7. ACHTUNG! Die Pulspumpe  
darf nicht zu stark gedrückt  
werden!**

Die Pulspumpe nur leicht  
drücken, um den Pulsschlag zu  
demonstrieren.



**8. weitere Infos:**  
Die Zunge des Hundes kann  
komplett rausgezogen und wie-  
der eingesetzt werden.

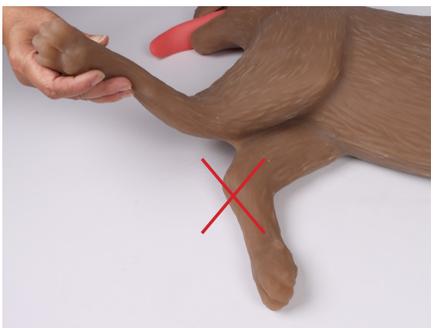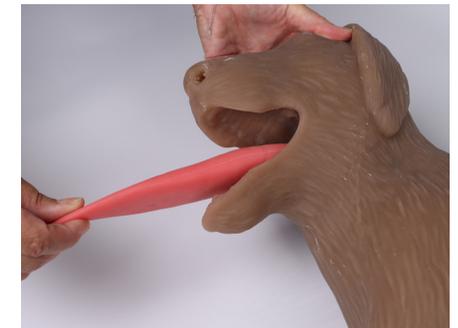

**9. Reißgefahr**  
Das Übungsmodell besteht aus  
weichem Material. Dies  
ermöglicht den Kopf zu  
überstrecken und zu drehen.

**Bitte nicht:**

- die Vorder- und Hinterläufe  
auseinanderziehen.
- der Hund nicht an den Glied-  
maßen tragen. Ein korrektes  
Tragen sehen Sie auf dem Bild.

