

Bedienungsanleitung

CPR Katze - CaPpeR

Art. Nr.: VET4880



*Experts in medical education
since 1950*



ERLER ZIMMER

Erl er-Zimmer GmbH & Co. KG · Hauptstr. 27 · D-77886 Lauf
Tel.: (+49) 07841/67191-0 · info@erler-zimmer.de · www.erler-zimmer.de

Benutzen Sie folgendes mitgeliefertes Werkzeug, um die Lungenbeutel in das Modell einzuführen.



Drücken Sie den Schrumpfschlauch und die Nasenlöcher der Katze zusammen.



Führen Sie den Schlauch durch die Nasenlöcher der Katze bis dieser im Hohlraum erscheint.



Führen Sie den Draht mit der engen, abgewinkelten Seite durch den Schrumpfschlauch.



Fädeln Sie den Lungenbeutel, offene Seite voran, in die verengte Stelle des Drahtes und ziehen diesen durch den Schrumpfschlauch zurück.



Breiten Sie nun den Lungenbeutel über die Nase aus.



Breiten Sie den Lungenbeutel in dem Hohlraum aus.



Setzen Sie den Schaumstoffblock in den Hohlraum.



Legen Sie die Katze auf die flache Seite, so dass der Schaumstoffblock Richtung Boden zeigt.



Der Simulator ist jetzt einsatzbereit.



Erlor-Zimmer GmbH & Co.KG

Hauptstraße 27

D-77886 Lauf

Tel.: +49 (0)7841 / 6003-0

Fax: +49 (0)7841 / 6003-20

E-Mail: info@erler-zimmer.de